

VICAIR®
the best in body support

Program
przeciwodleżynowo - korekcyjny
Holenderskiej firmy VICAIR®

ACADEMY ADJUSTER



Człowiek został stworzony aby trzymać postawę stojącą! Najbardziej obciążającą ludzki kręgosłup jest pozycja siedząca!

Jeżeli już jesteśmy skazani na postawę siedzącą to zadbajmy o komfort i ochronę.


1. Czym jest komfort? To po prostu brak uczucia dyskomfortu.
2. Na czym polega ochrona? Należy tutaj rozgraniczyć dwa rodzaje ochrony:
 - krótkoterminowa (głównie skupia się na **zabezpieczeniu przed tworzeniem się odleżyn**).
 - długoterminowa (**zabezpiecza przed deformacją kręgosłupa-skoliozą**).
3. Jak skutecznie zadbać o te dwie podstawowe ochrony? **Redukować ciśnienia i prawidłowo siedzieć.**

Jeżeli chodzi o ochronę przeciw-odleżynową to należy w sposób maksymalnie skuteczny zredukować ciśnienie. Jak to zrobić?

- Prawidłowo ułożyć ramiona i stopy tak aby zwiększyć przestrzeń wsparcia i zmniejszyć naciski.
- Zanurzyć się w siedzisku jak najgłębiej : dla dalszego zmniejszenia nacisku.
- Wyrównać ciśnienia: zmniejszenie deformacji tkanek przez użycie dynamicznego wsparcia
- Zminimalizować siły ścinające.

Ochrona długoterminowa wymaga prawidłowego pozycjonowania. Jak to zrobić?

- Zabezpieczyć kręgosłup przed deformacjami jakie powstają podczas siedzenia w dłuższym okresie czasu (skolioza, hyperkifoza, asymetria miednicy).
- Stworzenie optymalnej równowagi pomiędzy stabilnym siedzeniem a aktywnością.
- Zamienić siły ścinające na normalne siły.
- Ogólnie podnieść komfort.

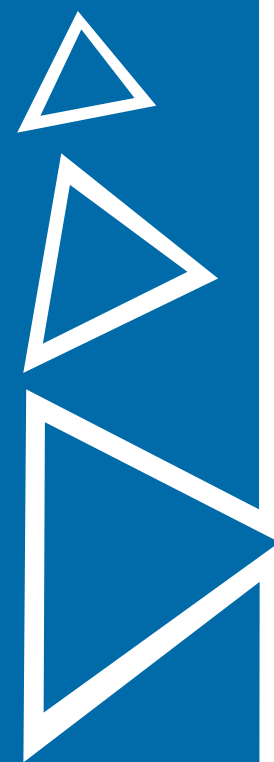

Czy jest szansa aby można wszystkie cele ochrony skóry spełnić stosując jeden sposób?


Aby mieć pewność , że jesteśmy chronieni krótko i długotermonowo wystarczy stosować specjalistyczne poduszki holenderskiej firmy **VICAIR®**.

Zalety dobrej poduszki.

- Komfort i funkcjonalność: stabilizacja /pozycjonowanie.
- Ochrona skóry: redukcja ciśnienia, minimalizacja sił ścinających się , kontrola temperatury/wilgotności.
- Łatwość używania i poręczność: waga, transfer, utrzymanie w czystości.
- Bezpieczeństwo i niezawodność: kontrole, uszkodzenia, niewłaściwe używanie.
- Adaptowalność: zakres stosowania, różne wymiary, wybór pokrowca, konfiguracji
- Przystępność i trwałość: cena, gwarancja, serwis.

Czym jest technologia **VICAIR®**?

Każda poduszka **VICAIR®** jest wypełniona setkami powietrznych komórek SmartCells. Komórki wykonane z materiału o bardzo niskim współczynniku tarcia poruszają się niezależnie od siebie, w sposób ciągły i dopasowują się do kształtu ciała użytkownika. To prowadzi do optymalnego rozkładu nacisku na całej powierzchni i zapewnia stabilne podparcie dla użytkownika.

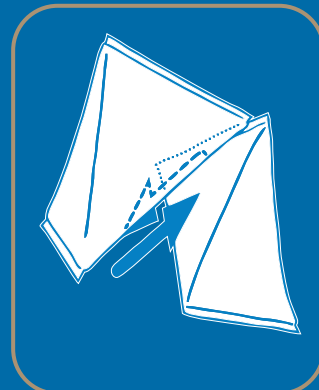

Jakie korzyści daje technologia **VICAIR®**?

- Dynamiczna adaptacja do kształtów ciała.
- Wysoka wydajność w redystrybucji ciśnienia.
- Stabilna pozycja.
- Bardzo niska waga.
- Bezawaryność.
- Łatwość dopasowywania.



1. Dystrybucja ciśnienia
2. Optymalne pozycjonowanie
3. Najłatwiejsza w użyciu



ADJUSTER to poduszka ,która ma bardzo szerokie zastosowanie . Została zaprojektowana dla użytkowników z każdego rodzaju asymetrią ciała . Może być skutecznie stosowana w takich przypadkach jak: hemiplegia, amputacje, rozszczep kręgosłupa. Poduszka nie tylko oferuje ogromną ochronę przeciwoleżynową ale również, poprzez specyficzny układ komór, koryguje występujące asymetrie. Nawet w ekstremalnych przypadkach asymetrii jest możliwe korygowanie postawy przez wypełnianie poszczególnych komór. Środkowa komora zabezpiecza przed wysuwaniem się z wózka. W przypadkach hemiplegii, aby umożliwić poruszanie wózka nogą, można wyregulować napełnienie jednej z przednich komór.



Gotowe do używania.

Ponad 95% poduszek jest gotowa do używania bezpośrednio po wyciągnięciu z kartonu. Jeżeli istnieje potrzeba dopasowania poduszki do pacjenta wystarczy usunąć z pokrowca właściwą pewną ilość poduszek SmartCell z poszczególnych komór lub przyłożyć z jednych komór do innych w zależności o efektu jaki się chce osiągnąć. Po tym zabiegu poduszka jest gotowa do używania przez bardzo długi okres bez konieczności konserwacji, czy obawy przed utratą ciśnienia jak to jest w poduszkach pompowanych.


Poduszka w standardzie wyposażona jest w jeden z dwóch rodzajów pokrowca : elastyczny oraz nieprzemakalny dla osób nie trzymających moczu. Wierzchnia warstwa w obu przypadkach wykonana jest z materiału rozciągliwego w dwu kierunkach aby zapewnić optymalne zanurzenie ciała w poduszce. Dodatkowo wierzchnia warstwa pokrowca elastycznego jest oddychająca co polepsza komfort oraz absorbcję wilgoci.

Poduszka ADJUSTER jest dostępna w dwóch wysokościach 6 cm oraz 10 cm. Dodatkową korzyścią jest niezwykle niska waga (poduszki w rozmiarze 45x45 cm wysokie na 6 cm ważą ~500 gram a 10 cm ~850 gram.).

rozmiary poduszek:
szerokość x głębokość

- 35cmx40cm
- 40cmx40cm
- 40cmx45cm
- 40cmx50cm
- 43cmx43cm
- 45cmx45cm
- 45cmx50cm
- 50cmx45cm
- 50cmx50cm

Wytrzymałość poduszki 150 kg

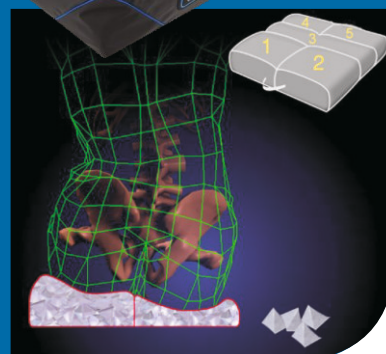



VERMEIREN Polska
ul.Łączna 1
55-100 Trzebnica
tel.713874210 faks 713870574
mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

