


VICAIR[®]
the best in body support

Program
przeciwodleżynowo - korekcyjny
Holenderskiej firmy VICAIR[®]

ACADEMY VECTOR

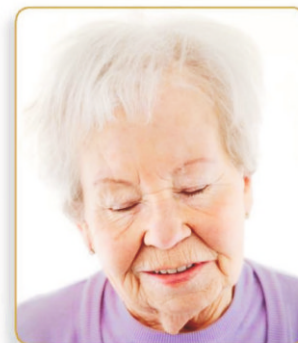

Człowiek został stworzony aby trzymać postawę stojącą! Najbardziej obciążającą ludzki kręgosłup jest pozycja siedząca!

Jeżeli już jesteśmy skazani na postawę siedzącą to zadbajmy o komfort i ochronę.


1. Czym jest komfort? To po prostu brak uczucia dyskomfortu.
2. Na czym polega ochrona? Należy tutaj rozgraniczyć dwa rodzaje ochrony:
 - krótkoterminowa (głównie skupia się na **zabezpieczeniu przed tworzeniem się odleżyn**).
 - długoterminowa (zabezpiecza przed deformacją kręgosłupa-skoliozą).
3. Jak skutecznie zadbać o te dwie podstawowe ochrony? **Redukować ciśnienia i prawidłowo siedzieć.**

Jeżeli chodzi o ochronę przeciw-odleżynową to należy w sposób maksymalnie skuteczny zredukować ciśnienie. Jak to zrobić?

- Prawidłowo ułożyć ramiona i stopy tak aby zwiększyć przestrzeń wsparcia i zmniejszyć naciski.
- Zanurzyć się w siedzisku jak najgłębiej : dla dalszego zmniejszenia nacisku.
- Wyrównać ciśnienia: zmniejszenie deformacji tkanek przez użycie dynamicznego wsparcia
- Zminimalizować siły ścinające.

Ochrona długoterminowa wymaga prawidłowego pozycjonowania. Jak to zrobić?

- Zabezpieczyć kręgosłup przed deformacjami jakie powstają podczas siedzenia w dłuższym okresie czasu (skolioza, hyperkifoza, asymetria miednicy).
- Stworzenie optymalnej równowagi pomiędzy stabilnym siedzeniem a aktywnością.
- Zamienić siły ścinające na normalne siły.
- Ogólnie podnieść komfort.

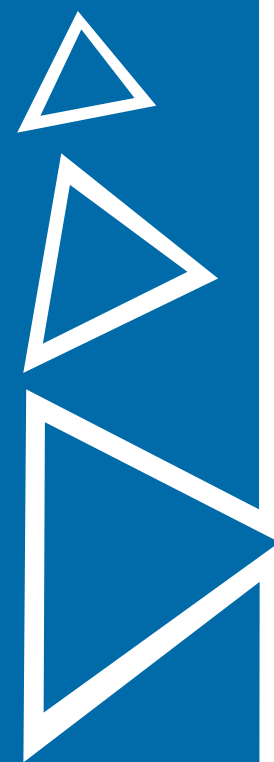

Czy jest szansa aby można wszystkie cele ochrony skóry spełnić stosując jeden sposób?



Aby mieć pewność , że jesteśmy chronieni krótko i długotermonowo wystarczy stosować specjalistyczne poduszki holenderskiej firmy **VICAIR®**.

Zalety dobrej poduszki.

- Komfort i funkcjonalność: stabilizacja /pozycjonowanie.
- Ochrona skóry: redukcja ciśnienia, minimalizacja sił ścinających się , kontrola temperatury/wilgotności.
- Łatwość używania i poręczność: waga, transfer, utrzymanie w czystości.
- Bezpieczeństwo i niezawodność: kontrole, uszkodzenia, niewłaściwe używanie.
- Adaptowalność: zakres stosowania, różne wymiary, wybór pokrowca, konfiguracji
- Przystępność i trwałość: cena, gwarancja, serwis.

Czym jest technologia **VICAIR®**?

Każda poduszka VICAIR® jest wypełniona setkami powietrznych komórek SmartCells. Komórki wykonane z materiału o bardzo niskim współczynniku tarcia poruszają się niezależnie od siebie, w sposób ciągły i dopasowują się do kształtu ciała użytkownika. To prowadzi do optymalnego rozkładu nacisku na całej powierzchni i zapewnia stabilne podparcie dla użytkownika.

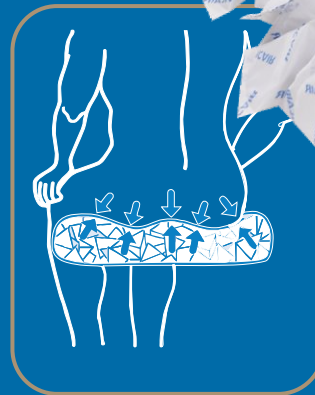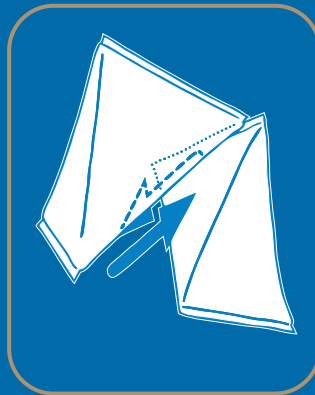

Jakie korzyści daje technologia VICAIR®?

- Dynamiczna adaptacja do kształtów ciała.
- Wysoka wydajność w redystrybucji ciśnienia.
- Stabilna pozycja.
- Bardzo niska waga.
- Bezawaryność.
- Łatwość dopasowywania.



1. Dystrybucja ciśnienia
2. Optymalne pozycjonowanie
3. Najłatwiejsza w użyciu



Vector to poduszka ,która zapewnia bardzo wysoki stopień stabilizacji. Pozwala to górnej części ciała użytkownika funkcjonować w sposób optymalny. Poduszka nadaje się dla użytkowników po paraliżach i z SM. Poduszki profilują w sposób anatomiczny siedzisko , zapewniają optymalną powierzchnię, zanurzenie i oferują funkcjonalną stabilizację. Kształt poduszki odciąża nacisk, gdzie ryzyko jest największe. Cztery komory boczne zapewniają stabilizację poziomą. Komora znajdująca się w centralnej tylnej części zapewnia głębokie zanurzenie i komfort dla guzów kulszowych. Przednie komory środkowe zabezpieczają przed zsuwaniem się z siedziska oraz skutecznie minimalizują siły ścinające. VECTOR zapewnia efektywną dystrybucję ciśnienia. Wysoki poziom stabilizacji jaki zapewnia poduszka VECTOR przekłada się na lepsze funkcjonowanie całego tułowia.



Gotowe do używania.

Ponad 95% poduszek jest gotowa do używania bezpośrednio po wyciągnięciu z kartonu. Jeżeli istnieje potrzeba dopasowania poduszki do pacjenta wystarczy usunąć z pokrowca właściwego pewną ilość poduszczynek SmartCell z poszczególnych komór lub przyłożyć z jednych komór do innych w zależności o efektu jaki się chce osiągnąć. Po tym zabiegu poduszka jest gotowa do używania przez bardzo długi okres bez konieczności konserwacji, czy obawy przed utratą ciśnienia jak to jest w poduszkach pompowanych.

Poduszka w standardzie wyposażona jest w jeden z dwóch rodzajów pokrowca : elastyczny oraz nieprzemakalny dla osób nie trzymających moczu. Wierzchnia warstwa w obu przypadkach wykonana jest z materiału rozciągliwego w dwu kierunkach aby zapewnić optymalne zanurzenie ciała w poduszce. Dodatkowo wierzchnia warstwa pokrowca elastycznego jest oddychająca co polepsza komfort oraz absorbcję wilgoci.

Poduszka VECTOR jest dostępna w dwóch wysokościach : 6cm oraz 10 cm. Dodatkową korzyścią jest niezwykle niska waga (poduszki w rozmiarze 45x45 cm wysokie na 6 cm ważą ~600 gram a 10 cm ~1 kg.).

rozmiary poduszek:
szerokość x głębokość
35cmx40cm
40cmx40cm
40cmx45cm
40cmx50cm
43cmx43cm
45cmx45cm
45cmx50cm
50cmx45cm
50cmx50cm

VECTOR Junior:
szerokość x głębokość
25cmx20cm
30cmx30cm
35cmx35cm

Wytrzymałość poduszki 250 kg





VERMEIREN Polska
ul.Łączna 1
55-100 Trzebnica
tel.713874210 faks 713870574
mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl

